

**MARISOL**<sup>®</sup>  
**fresh****Sprej rastvor za nos 50 ml e***Izotonični rastvor morske soli sa etarskim uljem eukaliptusa***INFORMACIJE O UPOTREBI**

Poštovani, pacijenti,  
molimo Vas da pre upotrebe pažljivo pročitate ovo uputstvo,  
jer ono sadrži za Vas važne informacije o upotrebi medicinskog sredstva  
Marisol.

Nakon čitanja, uputstvo nemojte bacati, jer ćete možda poželeti da neke  
podatke ponovo pročitate. Ukoliko imate nejasnoća ili su Vam potrebne  
dodatne informacije o ovom medicinskom sredstvu, obratite se lekaru ili  
farmaceutu.

**Sastav:** 1 ml spreja sadrži: 9 mg morske soli, 1.2 mg etarskog ulja eukaliptusa

Rastvarač: prečišćena voda

**Pomoćne supstance:** polisorbit 20, disodium EDTA, di natrijum hidrogenfosfat  
anh., natrijum dihidrogenfosfat anh.

Sadrži konzervans: benzalkonijum hlorid 0.1 mg/ml

**Kada deluje i kome je namenjen Marisol fresh sprej?**

Marisol fresh sprej rastvor za nos je rastvor morske soli obogaćen etarskim  
uljem eukaliptusa. Namenjen je osobama kod kojih je otežana fiziološka  
funkcija nosne sluzokože, kao i održavanju svakodnevne higijene nosnih  
šupljina. Marisol fresh rastvor vraća sluzokoži nosa njenu prirodnu vlažnost,  
sposobnost samoprečišćavanja i normalne produkcije sluzi koja je štiti od  
isušivanja i mehaničkih nadražaja (dima, prašine, itd..). Poboljšava prohodnost i  
olakšava cirkulisanje vazduha kroz gornje disajne puteve, a to je naročito  
korisno kod prehlade, gripa i problema sa sinusima. Rastvor je obogaćen  
etarskim uljem eukaliptusa koje deluje antiseptično, ublažava otok sluzokože  
nosa i pomaže kod infekcija gornjih disajnih puteva.

**Kada koristiti Marisol fresh sprej?**

- kod osoba sa neprohodnim disajnim putevima, virusnih prehlada i kijavica  
alergijskog porekla (alergijski rinitis)
- za svakodnevnu higijenu nosa
- kod zapušenog nosa
- kod upale sinusa (hronični sinuzitis)
- kod suve i nadražene sluzokože čija je normalna fiziološka funkcija  
poremećena
- kod akutnog zapaljenja sluznice nosa
- kod osoba koje su sklone isušivanju sluzokože disajnih puteva, tokom  
putovanja i boravka u prostorijama sa centralnim grejanjem i klima  
uređajima

**Kako se Marisol fresh upotrebljava?**

Odrasli i deca preko 6 godina starosti: 2-3 puta dnevno primeniti 1-2 prskanja  
u svaku nozdrvu.

Pre prve upotrebe skinuti zaštitni prsten sa plastičnog čepa - raspršivača. Bočicu  
držati u vertikalnom položaju. Skinuti zaštitni poklopac i nekoliko puta

pritisnuti pumpicu dok ne izade prvi mlaz spreja. Vrh nazalne pumpice uvući u nozdrvu, a zatim pritisnuti pumpni mehanizam. Pri tome bočicu držati uspravno, a glavu ne nagnjati unazad. Za vreme rasprskavanja spreja lagano udahnuti kroz nos. Nakon korišćenja vrh pumpice isprati mlazom čiste vode. Vratiti zaštitini poklopac.

**Šta još morate znati o Marisol fresh spreju i kada ga ne treba koristiti?**

Marisol fresh sprej ima odličnu podnošljivost, ne oštećuje sluzokožu nosne šupljine. Pri preporučenoj upotrebi Marisol fresh spreja ne očekuju se neželjeni efekti. Ne postoje posebne mere opreza za korišćenje Marisol fresh spreja. Ne preporučuje se primena Marisol fresh spreja u toku trudnoće i dojenja. Marisol fresh sprej mogu koristiti deca preko 6 godina starosti i odrasli.

Ipak, u retkim slučajevima kod preosetljivih osoba moguće su alergijske reakcije. Reakcije su blage i po pravilu se povlače po prestanku upotrebe preparata.

**Sada se vratite na sastav Marisol fresh spreja i još jednom ga pročitajte.**

Ukoliko znate da ste alergični na neki od sastojaka Marisol fresh spreja, nemojte ga upotrebljavati.

Ukoliko se u toku primene javi alergijska reakcija (otok, peckanje, bol, otežano disanje kroz nos), nemojte paničiti.

Prekinite upotrebu Marisol fresh spreja i obavestite lekara ili farmaceuta.

**Pročitajte i ovo:**

Ne gutati. Deca ne bi trebalo da koriste preparat bez nadzora odraslih.

Iz higijenskih razloga svaka osoba bi trebalo da ima svoju bočicu. Proizvod koristite samo u originalnom pakovanju.

Ne koristite proizvod nakon isteka roka upotrebe, označenog na pakovanju.

Nepravilna upotreba može imati štetne posledice.

**Način čuvanja:** Čuvati u originalnom pakovanju, na suvom i tamnom mestu, na temperaturi do 25°C, van domašaja dece.

**Rok upotrebe:** 3 godine od datuma proizvodnje.

Nakon prvog otvaranja proizvod se sme koristiti najduže šest nedelja.

**Pakovanje:** Plastična boca sa 50 ml rastvora i dozirnom nazal pumpicom

**Broj rešenja o registraciji medicinskog sredstva:**

515-02-01933-21-003 od 24.06.2021.

**Proizvođač medicinskog sredstva:**


ESENSA d.o.o. Viline vode bb, Beograd,  
Republika Srbija

[www.esensa.rs](http://www.esensa.rs)

Informacije možete dobiti besplatnim pozivom

iz Srbije na broj: **0800 200 300**

ili putem e-mail-a: [informacije@esensa.rs](mailto:informacije@esensa.rs)

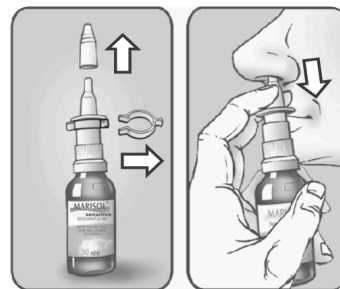

*Datum poslednje revizije uputstva za upotrebu medicinskog sredstva: april 2021.*



SRB

