

# MARISOL® Jet hipertonični sprej sa morskom vodom

## MARISOL® Strong Jet hipertonični sprej sa morskom vodom

### ZA ZAPUŠEN NOS

## Snaga mora u spreju

Pravilna higijena nosa je važna za bebe, decu i odrasle. Višak sluzi u nosnim šupljinama može da poveća širenje mikroba i prekomernu suvoću sluzokože nosa.

**MARISOL® Jet / MARISOL® Strong Jet hipertonični sprej za nos sa morskom vodom** snažno hidriraju nazalnu sluznicu zahvaljujući svom mehaničkom delovanju i pomaže ispiranju i eliminisanju sluzi, čime na jednostavan način uspostavlja fiziološku funkciju sluzokože nosa.

U **MARISOL® Jet / MARISOL® Strong Jet hipertoničnom spreju za nos** su očuvana ključna svojstva prirodne morske vode. **MARISOL® Jet / MARISOL® Strong Jet hipertonični sprej za nos sa morskom vodom** sadrži morskou vodu poreklom iz zaliva Kankal u Bretanji, koji je poznat po kvalitetu vode. Zaliv Kankal odlikuje izuzetan raspon plime i oseke (12 m) i zapljuškjuju ga snažne morske struje, što sprečava zagadjenje vode. Kako ova jedinstvena kombinacija prirodnih faktora obezbeđuje neprekidno samoprečišćavanje vode, rezultat je konstantno čista voda. Uzorkovanje vode se vrši automatski, onda kada je kvalitet vode optimalan (nakon perioda plime). Oblast uzorkovanja svrstana je u klasu A i stalno se kontroliše u pogledu zdravstvene ispravnosti (mikrobiološke, hemijske kontaminacije, sadržaja fitoplanktona, pH vrednosti...).

**Sastav:** Morska voda i prečišćena voda (2,2% natrijum hlorida).

### Indikacije:

**MARISOL® Jet hipertonični sprej za nos sa morskom vodom** je medicinsko sredstvo koje mogu da koriste deca i bebe od 3. meseca.

**MARISOL® Strong Jet hipertonični sprej za nos sa morskom vodom** je medicinsko sredstvo koje mogu da koriste odrasli i deca iznad 3 godine. Preporučuje se kod infekcija nazofaringealne sluznice, curenja nosa, infekcija paranasalnih sinus-a, kao i hrkanja izazvanog suvom sluzokožom nosa. Hipertonični sprej za nos sa morskom vodom uklanja višak tečnosti iz ćelija sluznice svojim osmotiskim efektom, omogućavajući mehaničko čišćenje i dekongestiju gornjih disajnih puteva, kao i smanjenje otoka mukoznih membrana.

Pravilna primena **MARISOL® Jet / MARISOL® Strong Jet hipertoničnog spreja za nos sa morskom vodom** u svakodnevnoj higijeni nosa pomaže kod: nazofaringitisu, opstruktivnog rinitisa i sinusitisa, iritacije i suvoće nosa, kao i promuklosti nastale usled suvoće mukoznih membrana. Takođe, svakodnevna upotreba je indikovana kao adjuvantna terapija u lečenju ORL i pedijatrijskih oboljenja.

### Uputstvo za upotrebu:

1. Skinjite zaštitni poklopac.
2. Nežno postavite vrh aplikatora na ulaz u nozdrvu i pritisnite pumpicu da biste naneli proizvod.
3. Pustite da isteči višak rastvora kako bi se uklonila sluz, a zatim izdjuvajte nos.
4. Ponovite postupak sa drugom nozdrvom.
5. Očistite vrh aplikatora vodom i osušite ga.
6. Postavite zaštitni poklopac na vrh aplikatora do sledeće primene.

Aplikovati u svaku nozdrvu više puta u toku dana, po potrebi.

### Uputstvo za upotrebu proizvoda kod beba:

1. Stavite bebu u ležeći položaj sa glavom blago nagnutom u stranu da bi se omogućio lakši ulazak morske vode u nozdrvu.
2. Raspršite sprej pritiskom na pumpicu u trajanju od nekoliko sekundi.
3. Uspravite bebu u sedeći položaj kako bi istekao sadržaj iz nosa i pokupite ga maramicom.
4. Ponovite postupak sa drugom nozdrvom.
5. Nežno obrinite predeo oko nozdrva bez uvlačenja maramice duboko u bebin nos.

Očistite vrh aplikatora vodom i osušite ga.  
Aplikovati u svaku nozdrvu 2 do 3 puta dnevno.

### Kontraindikacije i neželjena dejstva:

- Nisu navedena nikakva neželjena dejstva ukoliko se uzima preporučena terapeutска doza, ali u slučaju neželjenih dejstava обратите se lekaru ili farmaceutu.
- Švako teže neželjeno dejstvo u vezi sa ovim proizvodom mora da se prijavi proizvodaču i Agenciji za lekove i medicinska sredstva.

### Upozorenja i mere predostrožnosti:

- Iz higijenskih razloga, kao i u cilju sprečavanja širenja infekcije, sprej bocu treba da koristi samo jedna osoba.
- Čuvati van domaća dece.

### Način čuvanja i rok trajanja:

- Ne koristiti proizvod nakon isteka roka trajanja naznačenog na kutiji i boci.
- Čuvati na suvom i hladnom mestu.
- Odložiti bocu i zaštitni poklopac u odgovarajuće kontejnere.



### Pakovanje:

Sprej boca pod pritiskom od 120 ml sa aplikatorom za nos.

- **MARISOL® Jet hipertonični sprej za nos sa morskom vodom** - sa delikatnim raspršivanjem - pogodan za primenu kod dece i beba već od 3. meseca
- **MARISOL® Strong Jet hipertonični sprej za nos sa morskom vodom** - sa raspršivanjem srednje jačine - pogodan za primenu kod odraslih i dece iznad 3 godine

**Ovlašćeni predstavnik proizvodača i distributer:** ESENZA d.o.o.,  
Viline vode bb, Beograd, Republika Srbija, [www.esensa.rs](http://www.esensa.rs)

**PHARMALINK, S.L.**

Av. Universitat Autònoma, 13 Parc Tecnològic del Vallès  
08290 Cerdanyola del Vallès BARSELONA - ŠPANIJA



### Broj rešenja o registraciji medicinskog sredstva:

Marisol Jet, sprej rastvor za nos 120ml: 515-02-02086-21-002 od 12.07.2021.

Marisol Strong Jet, sprej rastvor za nos 120ml: 515-02-02085-21-003 od 12.07.2021.

Datum revizije uputstva za upotrebu medicinskog sredstva: januar 2021.

MD  
REF PL0033\_120\_Soft  
REF PL0033\_120\_Medium

CE 0051