

MARISOL[®]
sinusol

Sprej rastvor za nos 50 ml e

*Hipertonični rastvor morske soli
sa etarskim uljima ruzmarina i čajevca*

*Molimo Vas da pažljivo pročitate ovo uputstvo za upotrebu jer ono sadrži za Vas važne informacije o primeni medicinskog sredstva **Marisol[®] Sinusol sprej rastvor za nos**.*

Nakon čitanja, uputstvo sačuvajte, jer može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ukoliko imate nejasnoća ili su Vam potrebne dodatne informacije o ovom medicinskom sredstvu, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Marisol[®] Sinusol sprej rastvor za nos je hipertonični rastvor morske soli sa dodatkom etarskih ulja ruzmarina i čajevca.

Rastvor morske soli koji je u osnovi spreja je hipertoničan i pokazuje blagotvorne efekte na postizanje i održavanje fiziološke funkcije nazalne sluznice, naročito kada je ona otečena i sadrži sekret koji je potrebno prirodnim putem eliminisati iz nosa. Ovakav tip rastvora, apsorbuje vodu iz sluzokože i submukoze tj. drenira vodeni sadržaj, smanjujući otok zidova respiratornog trakta i samim tim olakšava disanje. Ne postoje ograničenja za dužinu njegove primene, jer ne oštećuje sluzokožu nosne šupljine i ne dovodi do pojave tolerancije.

Etarska ulja ruzmarina i čajevca u hipertoničnom rastvoru morske soli potpomažu kod poboljšavanja prohodnosti disajnih puteva, kao i kod sinusnih infekcija i drugih problema sa nazalnom kongestijom.

Raspršivanjem **Marisol[®] Sinusol sprej rastvora za nos** na potpuno prirodan način rešava se problem viška sekreta i eventualno prisutnih bakterija u sinusima, čime ujedno dolazi i do smanjenja osećaja bola i pritiska u ovom predelu.

Kada se primenjuje Marisol[®] Sinusol sprej rastvor za nos?

- Kod problema sa sinusima, akutnog i hroničnog sinuzitisa, alergijskog rinitisa i rinosinuzitisa
- Za smanjenje bola i osećaja pritiska u predelu sinusa
- Za smanjenje otoka sluznice nosa

Kako se upotrebljava Marisol[®] Sinusol sprej rastvor za nos?

Skinuti zaštitni poklopac. Pre prve upotrebe ukloniti zaštitni prsten sa plastičnog čepa i pritisnuti raspršivač par puta dok iz bočice ne počne da izlazi ravnomerna doza spreja. Sprej se prilikom svake sledeće upotrebe može odmah koristiti.

Vrh nazalnog aplikatora postaviti u nozdrvu, a zatim pritiskom na pumpicu osloboditi 1-2 doze. Prilikom ubrizgavanja, bočicu držati u vertikalnom položaju i lagano udahnuti kroz nos. Postupak ponoviti sa drugom nozdrvom. Sprej se može koristiti dva do tri puta dnevno.

Nakon upotrebe, nazalni aplikator treba obrisati, osušiti i potom vratiti zaštitni poklopac.

Prednosti primene Marisol[®] Sinusol sprej rastvor za nos:

Zahvaljujući sprej formi, preparat se može primenjivati u stojećem ili sedećem položaju, što omogućava komfornu primenu, bez potrebe za nagnjanjem glave unazad pri aplikaciji.

Marisol[®] Sinusol sprej rastvor za nos mogu koristiti odrasli i deca starija od 3 godine.

Kada ne treba primenjivati Marisol® Sinusol sprej rastvor za nos:

Marisol® Sinusol sprej rastvor za nos ne koristiti u slučaju preosetljivosti na neki od sastojaka proizvoda.

U retkim slučajevima, moguća je pojava alergijske reakcije kod preosetljivih osoba. U slučaju pojave alergijske reakcije na ovaj proizvod, obustaviti primenu i obavestiti lekara ili farmaceuta. Reakcije koje se mogu javiti su obično blage i po pravilu se povlače po prestanku upotrebe preparata.

Upozorenja i mere opreza za bezbednu primenu Marisol® Sinusol sprej rastvora za nos:

Deca bi trebalo da koriste preparat samo uz nadzor odraslih.

Iz higijenskih razloga svaka osoba bi trebalo da koristi svoju bočicu Marisol® Sinusol sprej rastvora za nos.

Proizvod koristiti samo u originalnom pakovanju. Ne koristiti proizvod nakon isteka roka upotrebe, označenog na pakovanju.

Ne postoje druge posebne mere opreza kojih se treba pridržavati pri korišćenju Marisol® Sinusol sprej rastvora za nos.

Ukoliko se pridržava preporučenog načina primene, ne očekuje se pojava neželjenih efekata.

Nema dostupnih podataka o štetnosti primene Marisol® Sinusol sprej rastvora za nos u toku trudnoće i dojenja.

Kako čuvati medicinsko sredstvo Marisol® Sinusol sprej rastvor za nos:

Marisol® Sinusol sprej rastvor za nos čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C. Bočicu čuvati u uspravnom položaju, čvrsto zatvorenu, van domašaja dece.

Rok upotrebe: 3 godine od datuma proizvodnje.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 30 dana.

Pakovanje: Složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi plastična sprej bočica sa 50 mL rastvora i uputstvo za upotrebu medicinskog sredstva.

Šta sadrži medicinsko sredstvo MARISOL® Sinusol sprej rastvor za nos:

1 mL rastvora sadrži 1 mg etarskog ulja ruzmarina, 0,5 mg etarskog ulja čajevca, 23 mg morske soli.

Pomoćne supstance: polisorbat 20; dinatrijum hidrogenfosfat anhidrovani; natrijum dihidrogenfosfat anhidrovani; dinatrijum-edetat; benzalkonijum hlorid; voda, prečišćena.

Broj rešenja o registraciji medicinskog sredstva:


515-02-00396-21-002 od 21.04.2021.

Proizvođač medicinskog sredstva:

ESENSA d.o.o., Viline vode bb, Beograd,
Republika Srbija

www.esensa.rs

Informacije možete dobiti besplatnim pozivom iz Srbije na broj: **0800 200 300** ili putem e-mail-a: informacije@esensa.rs

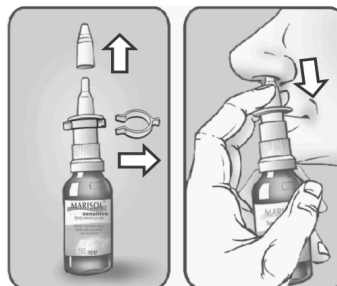

Datum izdavanja uputstva za upotrebu medicinskog sredstva: januar 2021.



SRB

